




Ghid rapid de utilizare

ViVest Pocket AED

Defibrilator semiautomat extern

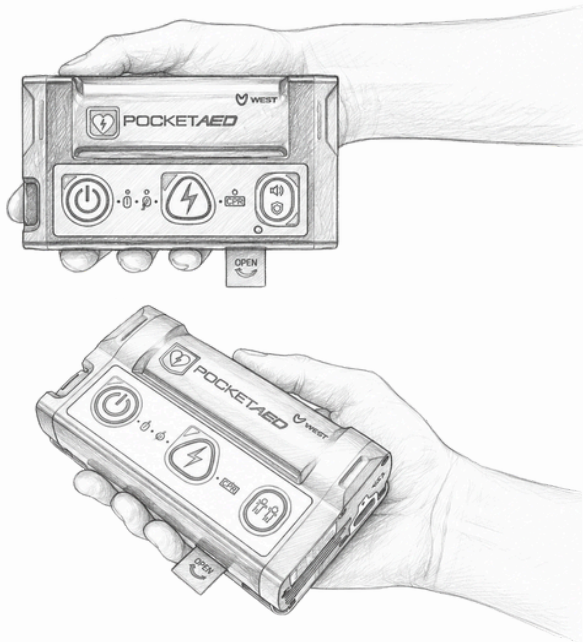



Vă mulțumim

că ați ales defibrilatorul semiautomat extern ViVest Pocket AED, distribuit de Medimpact.

Acest ghid este conceput pentru a ajuta orice persoană să intervină rapid și eficient în caz de stop cardiac subit, utilizând defibrilatorul semiautomat extern ViVest Pocket AED. Ghidul conține instrucțiunile esențiale de utilizare, în conformitate cu manualul de utilizare complet al dispozitivului.

Pentru informații detaliate, măsuri de siguranță și instrucțiuni de întreținere, consultați întotdeauna manualul de utilizare.


Păstrați acest ghid împreună cu defibrilatorul.

Pentru service, consumabile (padele, baterii) sau instruire în utilizarea defibrilatorului, contactați echipa Medimpact — distribuitor autorizat ViVest în România.

Cuprins: Panoul de control • pag. 3 | Când să utilizați AED-ul • pag. 4
Despachetarea • pag. 5 | Instalarea bateriei • pag. 6 | Aplicarea padelor • pag. 7 | Analiza și șocul • pag. 8 | Tratamentul pediatric • pag. 9 | După utilizare | Înlocuirea padelor și a bateriei • pag. 10 | Despre Medimpact • pag. 11 | Campania “Ai salvat o viață? Noi îți mulțumim!” • pag. 12


Panoul de control

P1

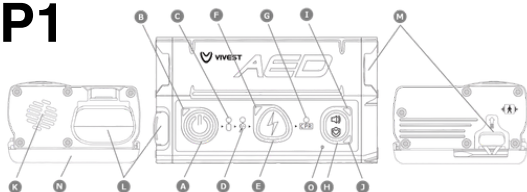

- | | |
|---|---|
| A: Buton de alimentare | I: Indicator Volum |
| B: Indicator de stare | J: Indicator mod identificare continuă FV/TV |
| C: Indicator pentru padele | K: Difuzor |
| D: Indicator pentru analiza ritmului cardiac | L: Baterie |
| E: Buton de șoc | M: Conector cablu padele |
| F: Indicator de șoc | N: Cutie de depozitare pentru padele |
| G: Indicator RCP | O: Microfon |
| H: Buton funcție | |

P3

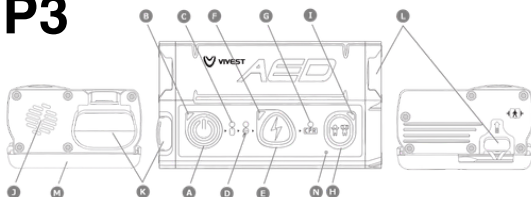

- | | |
|---|---|
| A: Buton de alimentare | H: Buton Copil |
| B: Indicator de stare | I: Indicator Mod Copil |
| C: Indicator pentru padele | J: Difuzor |
| D: Indicator pentru analiza ritmului cardiac | K: Baterie |
| E: Buton de șoc | L: Conector cablu padele |
| F: Indicator de șoc | M: Cutie de depozitare pentru padele |
| G: Indicator RCP | N: Microfon |

Când să **utilizați** AED-ul

Dacă persoana este:

- ▶ Inconștientă (nu răspunde la stimuli)
- ▶ Nu respiră sau respiră anormal

În aceste situații:

1. **Sunați la serviciul de urgență 112.**
2. Începeți imediat RCP (resuscitarea cardio-pulmonară).
3. Porniți AED-ul.



Despachetarea AED-ului

Pentru a asigura integritatea dispozitivului, scoateți cu atenție toate componentele din ambalaj și urmați pașii de mai jos pentru verificare:

1. Verificați integritatea dispozitivului AED.
2. Verificați dacă padelele sunt preconectate la dispozitiv.
3. Verificați sigiliul și data de expirare a padelor.
4. Verificați data de expirare a bateriei.

Verificarea rapidă a stării

În modul standby, dispozitivul permite verificarea rapidă a stării prin apăsarea *butonului Copil (modelul P3)* sau a *butonului Funcție (modelul P1)*, pentru a confirma că dispozitivul este pregătit pentru utilizare în situații de urgență.

- ▶ **Indicator de stare VERDE** = rezultat normal: dispozitivul este pregătit.
- ▶ **Indicator de stare ROȘU și 3 semnale sonore** = rezultat anormal: contactați Medimpact pentru mentenanță.

Notă: indicatorul de stare care luminează verde intermitent în modul standby confirmă că dispozitivul a trecut autotestul automat și este pregătit pentru utilizare.





Instalarea bateriei

Dispozitivul acceptă următoarele tipuri de baterii:

- ▶ Baterie de unică folosință (LiMnO₂)
- ▶ Acumulator reîncărcabil (Li-ion)

Pentru a instala bateria:

1. Introduceți partea din spate a bateriei în compartimentul bateriei.
2. Împingeți bateria până la capătul compartimentului.
3. Verificați dacă clema bateriei este complet introdusă în locașul bateriei.

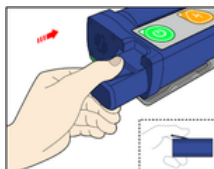
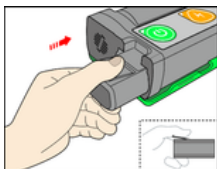


După instalarea bateriei, dispozitivul va rula automat un autotest.

Scoaterea bateriei:

Când dispozitivul emite mesajul „**Baterie descărcată**”, înlocuiți imediat bateria.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este în modul standby. Dacă dispozitivul este în modul salvare, apăsați butonul de alimentare timp de cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul standby.
2. Apăsați clema bateriei.
3. Scoateți imediat bateria.

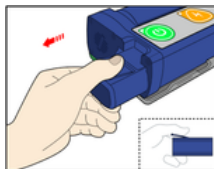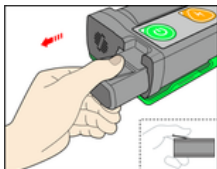

Aplicarea padelelor

1. Îndepărtați hainele de pe partea superioară a corpului

Asigurați-vă că pielea este curată și uscată. Dacă este necesar, radeți părul în exces de pe piept.



2. Deschideți pachetul cu padele din spatele dispozitivului

Trageți de clapeta „OPEN” a cutiei de depozitare pentru a accesa pachetul cu padele.



3. Scoateți padelele din pachet

Scoateți pachetul cu electrozi din spatele dispozitivului, deschideți-l și scoateți padelele.




4. Îndepărtați folia de pe padele

Dezlipiți folia de protecție de pe fiecare padelă și aplicați padelele pe pielea expusă a pacientului.




Poziționarea padelelor

ADULT: o padelă pe partea dreaptă a pieptului, sub claviculă, și cealaltă pe partea stângă, pe linia medio-axilară (în dreptul axilei).

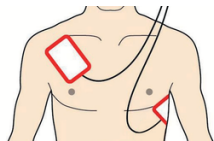


COPIL: o padelă în mijlocul pieptului, între mameloane, și cealaltă în mijlocul spatelui (poziție antero-posterioară).

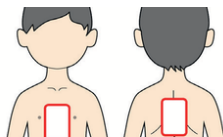

Analiza și administrarea șocului

1. Analiza ritmului cardiac

Asigurați-vă că nimeni nu atinge pacientul. Dispozitivul începe automat analiza ritmului cardiac: „Se analizează, nu atingeți pacientul”.

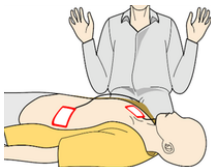


2. Se recomandă șoc

Dacă este detectat un ritm defibrilabil, butonul de șoc luminează portocaliu intermitent. Asigurați-vă că nimeni nu este în contact cu pacientul.




3. Apăsați butonul de ȘOC

Când butonul portocaliu de șoc luminează intermitent, apăsați-l imediat: „Apăsați butonul portocaliu de șoc”.

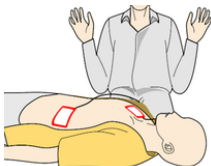

4. Efectuați RCP

Reluați imediat RCP după administrarea șocului sau dacă nu se recomandă șoc: „Începeți RCP”. Urmați ritmul sonor pentru compresiile toracice; după 30 de compresii, efectuați 2 ventilații.

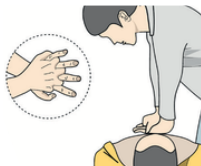

Important: AED-ul funcționează numai pe piele expusă. Îndepărtați sau tăiați hainele pentru a expune complet pieptul pacientului, inclusiv sutienul sau articolele de îmbrăcăminte restrictive. **Nimeni nu trebuie să atingă pacientul în timpul analizei ritmului cardiac și al defibrilării!**

Tratamentul pediatric

Numai modelul P3 (cu buton Copil)

Pentru pacienții cu vârsta **sub 8 ani** sau cu greutatea **sub 25 kg**, utilizați **Mod copil**:

1. Apăsați butonul **Copil** — indicatorul Mod copil începe să lumineze intermitent, iar dispozitivul emite mesajul vocal „*Pentru modul copil, apăsați butonul Copil 3 secunde*”.
2. Țineți apăsat butonul **Copil** timp de **3 secunde** — dispozitivul confirmă vocal „*Mod copil*”, iar indicatorul rămâne albastru continuu.
3. Energia de defibrilare scade automat de la 150 J la **50 J**.



Atenție: nu pierdeți timpul optim de acordare a primului ajutor pentru a determina vârsta pacientului. Dacă vârsta sau greutatea nu pot fi determinate, tratați pacientul în Mod adult. Pentru revenirea la Mod adult, opriți și reporniți dispozitivul.

După utilizare

1. Lăsați AED-ul pornit până la preluarea pacientului de către personalul medical de urgență.
2. Apăsați apoi butonul de alimentare cel puțin 2 secunde pentru a reveni în modul standby.
3. Înlocuiți padelele utilizate cu un set nou (padelele sunt de unică folosință) și introduceți-l în cutia de depozitare a dispozitivului.
4. Verificați nivelul bateriei și înlocuiți-o (sau încărcați acumulatorul), dacă este necesar.
5. Curățați dispozitivul cu o lavetă moale, umedă. Nu folosiți alcool pentru curățarea padelelor.
6. Contactați Medimpact pentru descărcarea datelor evenimentului și confirmarea stării de funcționare.

Înlocuirea padelelor și a bateriei

Verificați periodic:

- ▶ Padelele trebuie înlocuite după fiecare utilizare sau înainte de data de expirare (verificați eticheta de pe ambalaj).
- ▶ Verificați indicatorul de stare: **verde intermitent** = dispozitiv pregătit; **roșu intermitent** = necesită mentenanță.
- ▶ Utilizați numai padele, baterii și accesorii aprobate de producător, furnizate prin Medimpact.
- ▶ Consemnați operațiunile de mentenanță și înlocuirile în registrul AED al dispozitivului.

Avertisment: dispozitivul nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu deschideți capacul, risc de electrocutare. Pentru orice defecțiune, contactați Medimpact.

Despre Medimpact

SIMULARE MEDICALĂ • PRIM-AJUTOR • MEDICINĂ DE URGENȚĂ

Suntem o **companie românească fondată în 2001**, cu sediul în Cluj-Napoca — **de peste 25 de ani, partener al instituțiilor medicale și al profesioniștilor din sănătate**. Echipă dedicată, certificată **ISO 9001:2015**, parteneriate cu lideri mondiali în domeniul medical.

Activitatea noastră se bazează pe două direcții complementare:

- sisteme de instruire și simulatoare medicale pentru formarea profesioniștilor din sănătate;
 - echipamente și consumabile medicale pentru prim-ajutor, medicină de urgență și terapie critică;
- completate de consultanță specializată, instalare, mentenanță, calibrare și servicii post-vânzare tehnice și educaționale.

Ne găsiți online:



defibrilatoareaccespublic.ro — acces public la defibrilare: AED-uri și accesorii



simularemedicala.ro — instruire și simulare medicală



medimpactco.ro — echipamente și consumabile medicale pentru prim-ajutor, medicină de urgență și terapie critică



Ai **salvat** o viață? Noi îți mulțumim!

Dacă vei ajunge vreodată în situația de a interveni, **nu ezita**. Fie că ești singur sau faci parte dintr-o echipă, fiecare gest contează: **curajul de a acționa poate face diferența**.

Iar dacă, folosind un defibrilator ViVest, reușești să salvezi o viață, vrem să știm povestea ta. Pentru că oamenii care acționează merită susținuți: **ca semn de recunoștință, îți oferim ție sau echipei tale un Pocket AED din partea noastră.***

Premiul campaniei: ViVest Pocket AED **GRATUIT**



Cum ne transmiți povestea ta:

Contactează-ne și transmite-ne descrierea intervenției, împreună cu informațiile și documentele disponibile care pot susține cazul.



*Pentru regulamentul oficial al campaniei și criteriile de eligibilitate, te rugăm să ne contactezi sau să accesezi www.defibrilatoareaccespublic.ro.





SC MEDIMPACT SRL



Tel: +40 264 430 891
Fax: +40 264 439 412



office@medimpactco.ro



www.defibrilatoareaccespublic.ro
www.simularemedicala.ro
www.medimpactco.ro



Str. Lunetei nr. 14,
RO-400504, Cluj-Napoca

Peste 25 de ani de experiență în domeniul medical din România.
